



Inkontinenční vložky

Inkontinenční vložky Depend jsou speciálně navrženy pro lehký únik moči.



Všeobecné informace:


- Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
- Inkontinenční vložky nemají rozlišení přední a zadní strany (s výjimkou vložek Maximum) a absorbují tekutinu po celé své délce.
- Po použití vyhoďte výrobek do koše.
- Před použitím odstraňte příslušný obal a ochranný proužek.

Krok 1:




- Vyměňte vložku z obalu.

Krok 2:

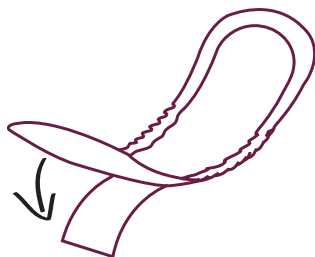

- Odstraňte ochranný papírový proužek.

Krok 3:

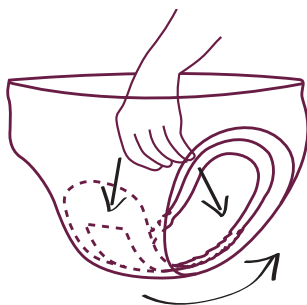

- Umístěte vložku lepicí páskou směrem dolů na vnitřní stranu spodního prádla.
- Vložku dobře přitiskněte, aby se nemohla přehnout nebo posunout.

Poslední kontrola:

- Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte dobré napojení vložky v kříži.



Depend pro muže 1


Inkontinenční vložky speciálně navržené pro muže s velmi malým únikem moči.

Všeobedné informace:

- Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
- Vložka je anatomicky tvarovaná, přední a zadní strana vložky je odlišná.
- Po použití vyhoďte výrobek do koše.
- Před použitím odstraňte příslušný obal a ochranný proužek.



Krok 1:

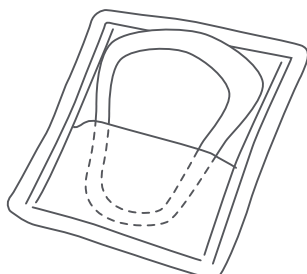

- Rozbalte celý obal vložky.


Krok 2:



- Vyjměte vložku tak, že ochranný papírový proužek zůstane v obalu.

Krok 3:


horní strana

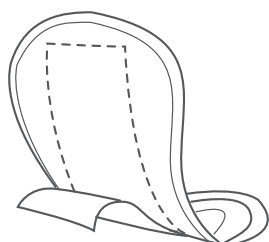

spodní strana

- Nalepte vložku širokou stranou nahoru do přední části přiléhavého spodního prádla.

Krok 4:

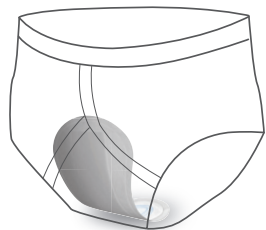

- Vložku dobře přitiskněte, aby se nemohla přehnout nebo posunout.

Poslední kontrola:

- Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte, aby se vložka nacházela před penisem.



Depend pro muže 2


Inkontinenční vložky speciálně navržené pro muže s lehkým únikem moči.

Všeobecné informace:

- Noste těsné přiléhavé spodní prádlo.
- Vložka je anatomicky tvarovaná, má odlišenou přední a zadní stranu.
- Po použití vyhoďte výrobek do koše.
- Před použitím odstraňte příslušný obal a ochranný proužek.



Krok 1:

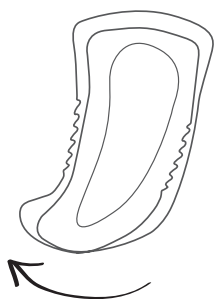


- Vyměňte vložku z obalu.

Krok 2:



- Zkontrolujte, co je přední a zadní strana výrobku. Na ochranném proužku na spodní straně vložky nalaznete označení.

Krok 3:

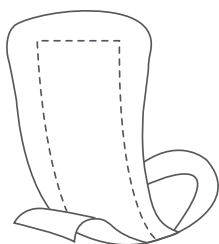

- Odstraňte ochranný papírový proužek.

Krok 4:



- Umístěte vložku lepicí plochou na vnitřní stranu spodního prádla.

Poslední kontrola:

- Vytáhněte si spodní prádlo dostatečně nahoru a zajistěte, aby se vložka nacházela před penisem.

Depend®

Slip Classic

Výrobek Depend® Slip Classic je speciálně navržený pro použití při středním stupni úniku moči, ne však v kombinaci s únikem stolice. Díky gumovým páskům umožňuje tento výrobek jednoduchou výměnu.




Všeobecné informace:

- V každém balení se nachází jeden pár extra zabalených gumových pásků.
- Po použití plenu vyhoďte do odpadkového koše, ale pásky uschovejte pro další použití.

Krok 1:

vnější strana

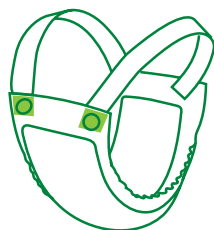


- Zkontrolujte, co je přední a zadní strana.
- Vnější strana výrobku je z bavlny a má zelené zpevněné knoflíkové dírky.

Krok 2:

Bez oblečení

vnější strana

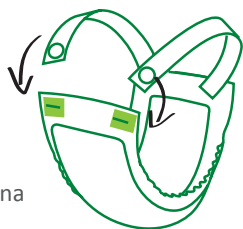

- Zapněte gumové pásky zevnitř směrem ven, aby se knoflíky nacházely na vnější straně - tedy nedotýkaly se pokožky.
- Oblékněte si kalhotky Slip Classic jako spodní prádlo a dobře srovnejte, aby dobře přiléhaly v oblasti kříže.


Krok 2:

S oblečením



- Pokud již máte na sobě oblečení, zapněte nejdříve gumové pásky na zadní straně, zevnitř směrem ven, aby byly knoflíky na vnější straně - tedy nedotýkaly se pokožky.
- Prostrčte stranu bez pásků mezi nohama směrem dopředu a zapněte pásky v sedě u stehů na přední straně. Poté si výrobek vytáhněte nahoru, aby dobře seděl.

Krok 3:

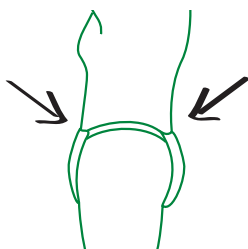

- Aby výrobek dobře seděl, přední a zadní strana se musí nacházet ve stejné výšce, gumové pásky by měli tvořit mírný oblouk směrem dolů.



Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby pásy nebyly přetočené.
- Zajistěte, aby případné kožní záhyby z vnitřní strany stehů zůstaly vně výrobku, předejdete tak průsaku a odřeninám.

TIPY

Pokud by byl gumový pásek příliš těsný nebo volný, můžete ho jednoduše prodloužit nebo zkrátit, a to následujícím způsobem.

• Zkrácení:

V pásku vystřihněte podélně knoflíkovou díрку, prostrčte knoflík vyrobenou knoflíkovou dírkou. Zajistěte, aby byly knoflíky vidět z vnější strany.

• Prodloužení:

Veďte si pár extra pásků, ustřihněte na jedné straně pásku knoflík a vystřihněte v jeho místě knoflíkovou díрку. Prostrčte knoflík druhého pásku. Upevněte ho na výrobku. Zajistěte, aby byly knoflíky vidět z vnější strany.

Depend®

Natahovací kalhotky pro ženy nebo pro muže


Natahovací kalhotky Depend jsou určeny pro střední až těžký únik moči, ne však v kombinaci s únikem stolice. Jsou anatomicky tvarované a zajišťují tak maximální ochranu a pohodlí. Depend nabízí variantu zvlášť pro ženy nebo pro muže v široké škále velikostí.



Všeobecné informace:


- Vyberte si správnou velikost, úroveň absorpce a správný výrobek (muž/žena).
- Výrobek nenatřepávejte, ani netřete mezi rukama. Tím se poškodí vrstva celulózy a vzniká prostor pro únik moči
- Kalhotky po použití vyhodte do koše.

Krok 1:

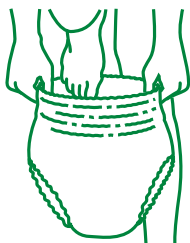


- Vyměňte kalhotky z obalu a dobře je roztáhněte. Oblékněte je jako běžné spodní prádlo. Zadní strana je označena barevným obdélníkem.

Krok 2:

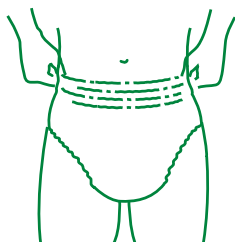

- Kalhotky natáhněte tak, aby dobře držely v oblasti kříže.

Krok 3:

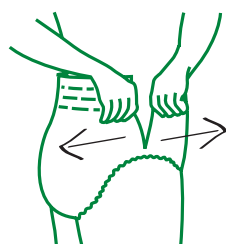

- Pro svléknutí natrhněte boční část kalhotek směrem od sebe.

Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen, zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.

Depend®

Natahovací kalhotky Easy-Fit

Natahovací kalhotky Easy-Fit jsou určeny pro střední až těžký únik moči. Unikátní systém 2 v 1 umožňuje jednoduchou kontrolu a výměnu bez nutnosti svlékání.



Všeobecné informace:


- Vyberte si správnou velikost a oblékněte si kalhotky jako běžné spodní prádlo.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama. Poškodila by se tak vrstva celulózy a došlo by k protečení.
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:



- Vyjměte kalhotky z obalu a dobře je roztáhněte.

Krok 2:

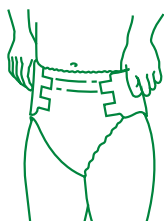

- Kalhotky vytáhněte nahoru, aby dobře seděli v oblasti kříže.

Krok 3:



- Pomocí lepicího pásku můžete upravit velikost.

Krok 4:




- Při svlékání můžete kalhotky na bocích roztrhnout.




Easy-Fit - výměna kalhotek

Krok 5:

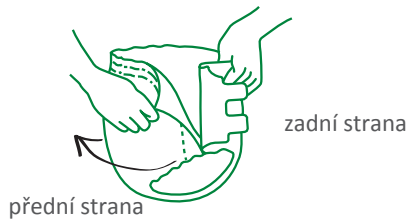

- Vyměňte kalhotky z obalu a rozepte lepicí pásky. Nyní můžete roztrhnout perforaci, která se nachází na přední straně pod záhybem lepicích pásků asi 1 cm od postranního švu. Když zlehka natáhnete boční stranu kalhotek, uvidíte perforaci.

Krok 6:

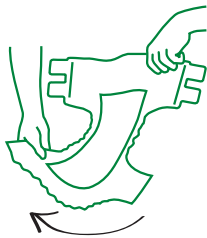

- Rozviňte výrobek do šířky do tvaru misky.

Krok 7:




- Sedněte si na toaletu, židli nebo okraj postele.
- Prostrčte výrobek mezi nohama směrem dopředu.

Krok 8:



- Zalepte pásky nejprve na jedné straně.
- Kalhotky máte nyní na jedné noze. Postup opakujte i na druhé straně.

Krok 9:

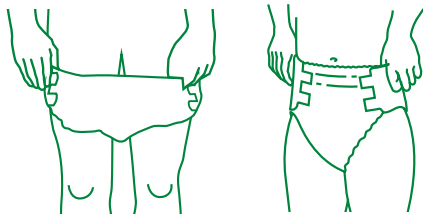


- Vytáhněte kalhotky nahoru, aby dobře seděly v oblasti kříže. Pomocí lepicích pásků můžete dopravit velikost.

Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.
- Zajistěte, aby kalhotky dobře seděly v oblasti kříže.

Vložné pleny - výměna vestoje


Vložné pleny Depend jsou navrženy pro střední stupeň inkontinence, jsou vhodné i při úniku stolice.

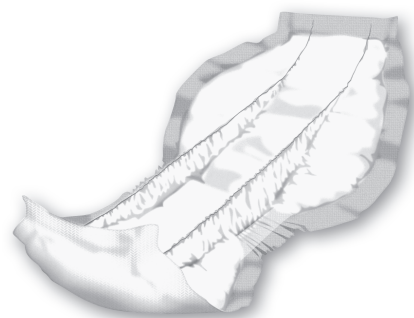

Všeobecné informace:


- Vyberte správnou úroveň absorpce.
- Výrobek má odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
- Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
- Používejte těsné spodní prádlo.
- Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpije).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:

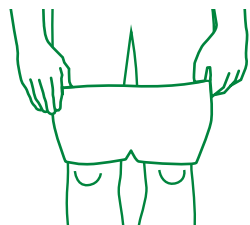


- Obepínající spodní prádlo si vytáhněte těsně nad kolena.

Krok 2:

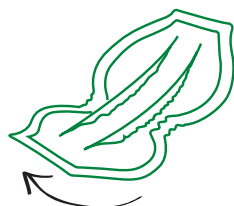


- Rozevřete výrobek potištěnou stranou dolu, aby se vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe rozloží a ochranné okraje se tak dobře narovnájí. Krátkou stranu vložné pleny nechte vpředu.

Krok 3:

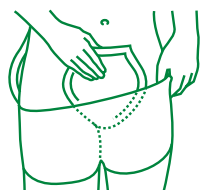

- Výrobek rozevřete opět v tříslech. Přílehavé spodní prádlo vytáhněte nahoru.

Krok 4:

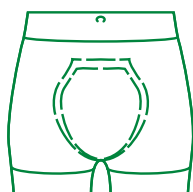

- Ubezpečte se, že vložná plena dobře sedí na svém místě.

Poslední kontrola:


- Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak případnému protečení a odřeninám.
- Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.



TIPY

Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

- Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.
- U osob s trvalým ochabnutím svalů nebo se ztuhlýma nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní část vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předědte tak podráždění pokožky.

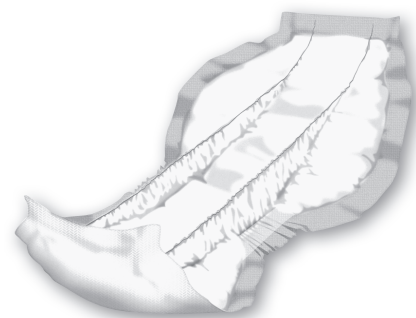

Vložné pleny - výměna vsedě

Vložné pleny Depend jsou navrženy pro střední stupeň inkontinence. Jsou vhodné i při úniku stolice.

Všeobecné informace:


- Vyberte správnou úroveň absorpce.
- Výrobek má odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
- Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
- Používejte těsné spodní prádlo.
- Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpíje).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:



- Vytáhněte si těsné spodní prádlo těsně pod kolena

Krok 2:

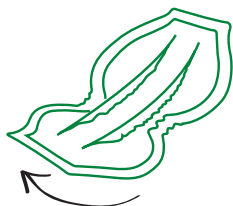

- Rozevřete výrobek potištěnou stranou nahoru, aby se vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe rozloží a ochranné okraje se tak dobře narovnají. Krátkou stranu vložné pleny nechte vpředu.

Krok 3:



- Vstaňte, výrobek vytáhněte nahoru a rozviňte v tříslech. Oblečte si přiléhavé spodní prádlo.


Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže z vnitřní strany stehů zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému protečení a odřeninám.
- Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.

TIPY

Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

- Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.
- U osob s trvalým zkrácením svalů nebo se ztuhlými nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní část vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předejdete tak podráždění pokožky.

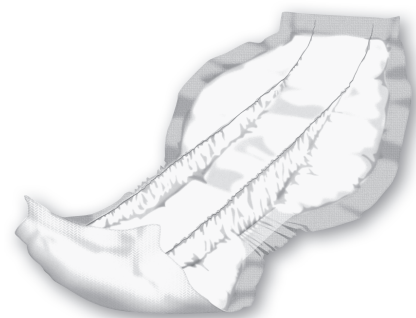

Vložné pleny - výměna vleže

Vložné pleny Depend jsou navrženy pro střední stupeň inkontinence.

Jsou vhodné i při úniku stolice.

Všeobecné informace:


- Vyberte správnou úroveň absorpce.
- Výrobek má odlišenou přední a zadní stranu (přední strana je krátká, zadní strana je dlouhá)
- Výrobek nenatřepávejte a netřete ho mezi rukama.
- Používejte těsné spodní prádlo.
- Indikátor vlhkosti Vás upozorní na výměnu (potisk na vnější straně se rozpije).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:



- Položte uživatele na bok a natáhněte mu přiléhavé spodní prádlo nad kolena.

Krok 2:

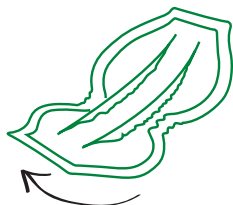

- Rozevřete výrobek dvojitě do šíře potišťovanou stranou nahoru, aby se vytvořil žlábek. Tekutina se tak lépe rozloží a ochranné okraje se tak dobře narovnají. Krátkou stranu vložné pleny nechte vpředu.

Krok 3:



- Výrobek v tříslech rozviňte a položte přes zadní část těla, poté natáhněte jednou stranou spodní prádlo.

Krok 4:

- Otočte uživatele na záda. Zajistěte, aby vložná plena dobře držela na svém místě a natáhněte druhou stranu spodního prádla.



Poslední kontrola

- Zajistěte, aby případné zahyby kůže z vnitřní strany stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak případnému protečení a odřeninám.
- Zajistěte, aby výrobek dobře držel v oblasti kříže.

TIPY

Použití tohoto výrobku u geriatrických pacientů nemůžeme vždy doporučit. Výrobek je volně vložen v prádle a lze ho snadno odstranit.

- Mužům, u kterých dochází pouze k úniku moči, umístěte krátkou stranu dozadu.
- U osob s trvalým zkácením svalů nebo se ztuhlýma nohama těsně u sebe, rozbalte vnitřní část vložné pleny venku a prostrčte vložnou plenu mezi nohama směrem dopředu. Předejdete tak podráždění pokožky.

Depend®

Absorpční kalhotky Flex

Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určeny pro těžký stupeň inkontinence.



Všeobecné informace:


- Vyberte si správnou velikost.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození celulózy a možnému průsaku.
- Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti (potisk na vnější straně se rozpíje).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:




- Vyměňte výrobek z obalu a roztáhněte pás. Rozviňte výrobek do šířky.

Krok 2:

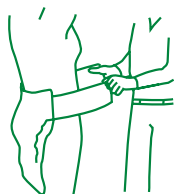


- Položte výrobek vzadu na boky a vpředu zapněte pás.

Krok 3:

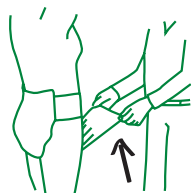

- Prostrčte výrobek mezi nohama směrem dopředu.

Krok 4:

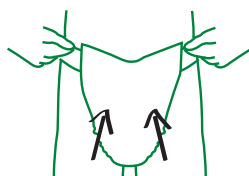

- Upevněte lepicí pásky a doupravte velikost.



Poslední kontrola:

- Zkontrolujte, že se lepicí pásky nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění.
- Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehů zůstaly vně výrobku.

TIPY


- Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru. Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.

Absorpční kalhotky Flex - výměna vsedě

Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určené pro těžký stupeň inkontinence.

Všeobecné informace:

- Vyberte si správnou velikost.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození celulózy a průsaku.
- Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti (potisk na vnější straně se rozpíje).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

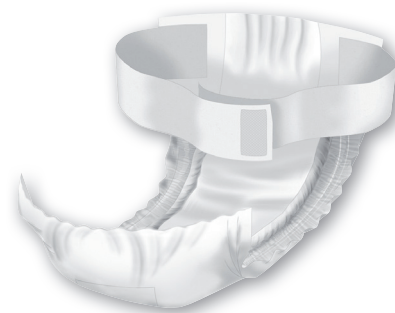


Krok 1:




- Vyjměte výrobek z obalu a roztáhněte pás. Rozviňte výrobek do šířky.

Krok 2:

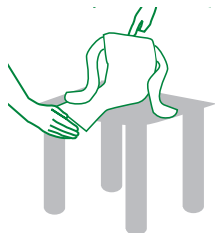


- Položte výrobek na židli nebo postel, aby si na něj uživatel mohl sednout, tak že budete moci upevnit pás okolo jeho boků.

Krok 3:

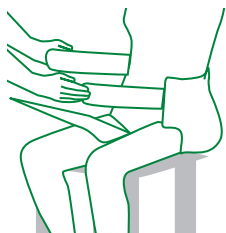

- Upevněte pás okolo boků.
- Prostrčte výrobek dopředu mezi nohama.


Krok 4:

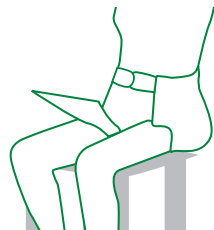

- Rozviňte obě strany výrobku a zajistěte, aby přední i zadní strana přiléhaly.



Krok 5:

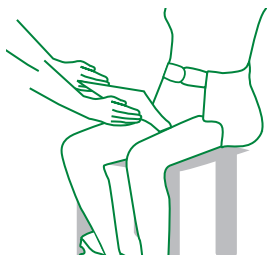

- Upevněte modrý lepicí pásek.

Poslední kontrola:


- Zkontrolujte, že se lepicí pásky nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění.
- Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehů zůstaly vně výrobku.

TIPY

- Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru. Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.

Absorpční kalhotky Flex - výměna vleže

Prodyšné absorpční kalhotky Depend Flex jsou určeny pro těžký stupeň inkontinence.

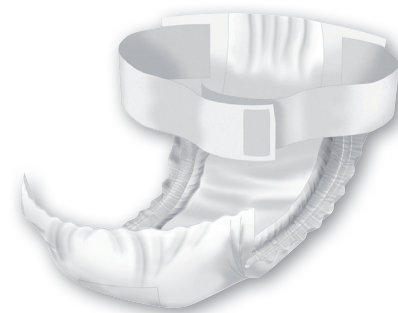

Všeobecné informace:

- Vyberte si správnou velikost.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Zamezíte tak možnému poškození celulózy a průsaku.
- Na možnou potřebu výměny upozorní indikátor vlhkosti (potisk na vnější straně se rozpíje).
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:




- Vyjměte výrobek z obalu a roztáhněte pás. Rozviňte výrobek do šířky.

Krok 1:



- Otočte uživatele na bok, přiložte výrobek na hýždě a bokový pás pod uživatele.

Krok 3 a 4:

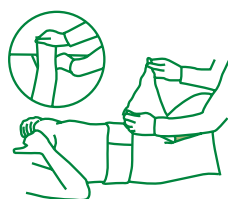

- Obráťte uživatele zpět na záda.
- Vytáhněte druhou stranu bokového pásu dopředu a zapněte ho.
- Prostrčte výrobek mezi nohama dopředu a upevněte modré lepicí pásky.



Poslední kontrola:

- Zkontrolujte, že se lepicí pásy nedotýkají pokožky, zabráníte tak jejímu podráždění.
- Zkontrolujte, zda se výrobek nachází ve správné výšce.
- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.

TIPY

- Absorpční kalhotky Flex jsou méně vhodné pro noční použití, díky svému tvaru. Proto doporučujeme na noc použít spíše plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus.



Plenkové kalhotky - výměna vestoje


Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. Lepicí pásy umožňují opakovanou kontrolu stavu.



Všeobecné informace:

- Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předejdete tak poškození celulózy a možnému průsaku.
- Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny (potisk na vnější straně se rozpíje).
- V místě lepicích pásek nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:

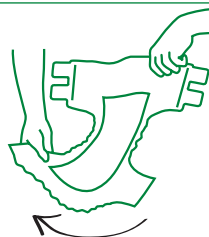


- Vyjměte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez zásahu do vnitřní části pleny.

Krok 2:




- Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

Krok 3:

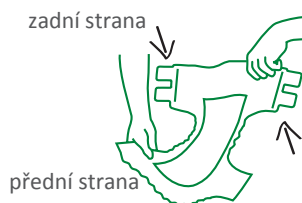

- Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku.
- Zadní strana má na bocích lepicí pásy.

Krok 4:

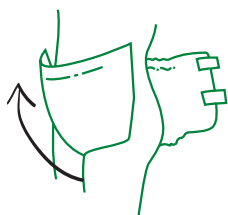


- Prostrčte výrobek mezi nohama směrem dopředu a nahoru
- Rozbalte kalhotky na zadní straně a stanovte přesnou výšku.

Krok 5:



- Rozbalte přední stranu a zapněte dolní lepicí pásy.

Krok 6:

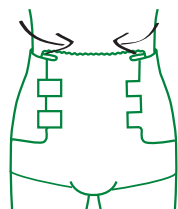

- Poté zapněte horní lepicí pásy.

Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku.

Plenkové kalhotky - výměna vsedě

Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. Lepicí pásy umožňují opakovanou kontrolu stavu.



Všeobecné informace:

- Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předejdete tak poškození celulózy a možnému průsaku.
- Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny (potisk na vnější straně se rozpije).
- V místě lepicích pásek nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:



- Vyměňte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez zásahu do vnitřní části pleny.

Krok 2:




- Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

Krok 3:



- Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku.
- Zadní strana má na obou stranách lepicí pásy.

Krok 4:

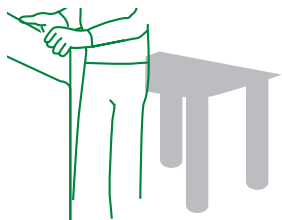

- Nechte uživatele, aby se postavil.

Krok 5:




- Položte rozloženou plenkou na židli, vnitřní strana směřuje nahoru. Zadní strana s lepicími pásky směřuje k opěradlu.

Krok 6:



- Posadte uživatele doprostřed plenk. kalhotek.

Krok 7:

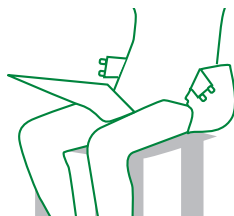

- Prostrčte přední stranu mezi nohama.

Krok 8:



- Zalepte kalhotky, nejprve spodní pásky, poté horní pásky, případně doupravte velikost utažením lepicích pásků.

Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému průsaku a odřeninám.



Plenkové kalhotky - výměna vleže

Plenkové kalhotky jsou navrženy pro těžký stupeň inkontinence i pro únik stolice. Lepicí pásy umožňují opakovanou kontrolu stavu.



Všeobecné informace:

- Vyberte správnou velikost a absorpční úroveň.
- Výrobek nenatřepávejte a netřete mezi rukama. Předjdete tak poškození celulózy a možnému průsaku.
- Indikátor vlhkosti upozorní na potřebu výměny (potisk na vnější straně se rozpije).
- V místě lepicích pásky nepoužívejte pudr, tělové mléko nebo krém.
- Použitý výrobek vyhodte do koše.

Krok 1:




- Vyměňte výrobek z obalu a napněte ho do šířky bez zásahu do vnitřní části pleny.

Krok 2:



- Vnější strana je z bavlny a obsahuje indikátor vlhkosti.

Krok 3:

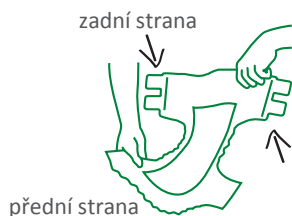


- Zkontrolujte, kde je přední a zadní strana výrobku
- Zadní strana má na obou stranách lepicí pásy.

Krok 4:




- Otočte uživatele na bok.

Krok 5:

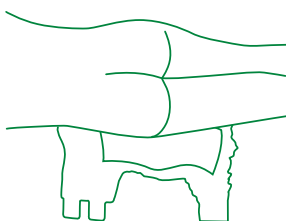

- Umístěte zadní stranu kalhotek na hýždě uživatele a zasuňte spodní stranu pod uživatele.

Krok 6:

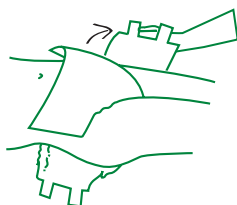


- Otočte uživatele zpět na záda.

Krok 7:



- Prostrčte přední díl kalhotek mezi nohama.

Krok 8:

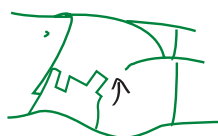

- Zalepte pásy na přední díl kalhotek, nejprve spodní pásy a poté vrchní pásy.
- Pomocí lepicích pásku upravte velikost, aby kalhotky dobře seděly.

Poslední kontrola:

- Zajistěte, aby případné záhyby kůže na vnitřní straně stehen zůstaly vně výrobku. Předejdete tak možnému průsaku a odřeninám.