

SPODNÍ PRÁDLO K POUŽITÍ V PŘÍPADĚ MÍRNÉHO SELHÁNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁVOD K POUŽITÍ

Autorská práva

Autorská práva k tomuto návodu k použití patří firmě New Systems Handels GmbH. Všechna práva, včetně práv k překladu, jsou vyhrazena. Jakákoliv část této informace nesmí být kopírována jakoukoliv formou (jako výtisk, fotokopie, mikrofilm nebo jakoukoliv jinou metodou), jak v celku tak v části, ani upravována, kopírována, překládána nebo propagována pomocí elektronických systémů bez písemného souhlasu New Systems Handels GmbH. Porušení předpisů může způsobit uložení trestních sankcí.

Omezení zodpovědnosti

New Systems Handels GmbH nenese zodpovědnost za poškození těla, materiální škody, poškození výrobků anebo následné škody vzniklé anebo nesené ve výsledku nedodržování tohoto návodu k použití, nesprávného používání výrobku anebo jiných jednání. Zakazuje se také samovolného provádění technických změn ve výrobku.

Návod k použití

Tento návod k použití týká se konečných uživatelů. Tento návod k použití popisuje strukturu, funkci a fungování výrobku. Prosíme o pečlivé seznámení se s tímto návodem k použití a o ujistění se, že byl návod pochopen! Je třeba postupovat v souladu s návodem za účelem zajištění bezpečného používání výrobku. Nesmí se postupovat v souladu s pokyny vydanými neoprávněnými třetími osobami.

Klasifikace


Spodní prádlo k používání v případě mírného selhání močového měchýře je označena jako výrobek třídy I v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích (Medical Device Regulation, MDR) - (2017/745) týkajícím se zdravotnických prostředků.

Symbody

 MD	Zdravotnický prostředek		Výrobce
 LOT	Charge		Vyhodit do odpadků
	Pozor! Před použitím je třeba přečíst návod k použití		Nevyhozovat do toalety

1. POPIS VÝROBKU

Spodní prádlo pro ženy a muže SELENACARE/SOUVERÄN k používání v případě mírného selhání močového měchýře pomáhá absorbovat únik moči během kýchání, kašle anebo fyzické námahy. Díky inovační mnohvrstevné technologii toto prádlo zajišťuje komfort obvyklého spodního prádla spojeného s vrstvou odvádějící vlhkost, antibakteriální ochranou a paropropustnou tkaninou.

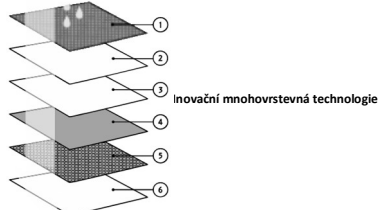

- 1 Vnitřní vrstva: Přenášení vlhkosti
- 2 Absorbování vlhkosti a předcházení nepříjemnému zápachu
- 3 Absorbování vlhkosti a předcházení nepříjemnému zápachu*
- 4 Velmi savé polyesterové jádro
- 5 Paropropustná a těsná ochranná membrána
- 6 Vnější vrstva: Tkanina příjemná pro kůži

Hygiena a čistota na základě chloridu stříbrného - naše tkaniny mají antibakteriální ochrannou úpravu (SILVERPLUS*/RUDOLF GROUP). EPA-registration, OEKO-TEX® Standard 100-listing. Předchází rozmnožování se bakterií působících nepříjemné zápachy. Je vhodná k praní. Čistě tkaniny dokonce i v nízkých teplotách prání, což umožňuje ušetřit energii a náklady spojené s péčí o tkaniny.

Obsah obalu: - 1x návod k použití
- 1x spodní prádlo

Určení: Víceúčelové použitelné kalhotky pro osoby s mírným selháním močového měchýře, které bezpečně absorbují únik moči

Období používání: Použité prádlo je třeba vyměnit do 60 minut po úniku moči

Životnost: Životnost výrobku činí cca. 60 prání

Doporučení: Mírná inkontinence

Kontraindikace: V případě vyskytnutí se podráždění kůže je třeba vyhledat lékařskou pomoc

Potenciální nežádoucí účinky/rizika: Nebyly potvrzeny nežádoucí účinky a/nebo rizika spojená s výrobkem

Cílová skupina odběratelů: Osoby s mírným selháním močového měchýře

2. POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: V případě vyskytnutí se podráždění kůže je třeba sejmout spodní prádlo a vyhledat lékařskou pomoc.

POZOR: Výrobek nesmí se používat neshodně s doporučenými technickými specifikacemi.

POZOR: V případě, jestli obal je poškozen před použitím výrobku, je třeba ho vyměnit za nový. Nesmí se používat výrobky z poškozených obalů.

Způsob používání

1. Otevřít obal a vyjmout spodní prádlo
2. Před prvním oblečením spodního prádla je třeba je vyprat v pračce
3. Vyměnit oblečené spodní prádlo 60 minut po úniku moči
4. V případě, kdy spodní prádlo bylo použito, je třeba je vyprat

Čištění

1. Nové anebo použité spodní prádlo vypláchnout ve studené vodě
2. Umístit v pračce a nastavit příslušný program prání v teplotě 30° C
3. Po vyprání spodní prádlo je třeba ponechat k vysušení na vzduchu

POZOR: Během prání se nesmí používat bělicí prostředky ani prostředky s obsahem změkčujících látek, protože mohou mít vliv na snížení funkčnosti a vlastností výrobku.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Seznam všech variant a použitých materiálů a jednotlivých částí je dostupný na vyžádání ve firmě New Systems Handels GmbH a/nebo na internetové stránce New Systems Handels GmbH.

4. SKLADOVÁNÍ A TRANSPORT

Tento výrobek může být přepravován a skladován jen v obalu, který je určen k těmto účelům. Nejsou vyžadovány žádné zvláštní přepravní podmínky.

Tento výrobek je třeba skladovat v okolní teplotě a musí být chráněn proti přímému vlivu slunečních paprsků. Výrobky neměly byt skladovány v blízkosti chemických látek, dezinfekčních prostředků anebo radioaktivních zdrojů.

5. LIKVIDACE

Likvidace musí být provedena v souladu se státními a lokálními předpisy a pravidly.

Více informací najdete na straně www.selena.care